

## Istruzioni per l'utilizzo sicuro del sollevatore

Rev. 00  
Emissione  
01/02/2020

Pagina  
1/9



### **Destinatari**

Infermieri e personale OSS dei reparti ospedalieri e del Servizio Domiciliare dell'ASL TO4.  
Infermieri e personale OSS delle RSA e strutture di ricovero per anziani.

## **Istruzioni per l'utilizzo sicuro del sollevatore**

Rev. 00  
Emissione  
01/02/2020

Pagina  
2/9

### **PREMESSA**

L'opuscolo rappresenta un vademecum per il corretto utilizzo del sollevatore, nell'ottica di prevenire la caduta della persona assistita, durante il suo impiego.

Non sostituisce l'addestramento che ogni operatore, nel corso della sua formazione personale e lavorativa, è tenuto a fare.

A seguire alcune semplici e pratiche indicazioni, supportate da illustrazioni, per agevolare l'operatore durante la movimentazione della persona assistita, con sollevatore.

In dettaglio, sono presenti indicazioni su:

- 1- Scegliere l'imbragatura
- 2- Identificare la tipologia di aggancio
- 3- Evitare comportamenti a rischio
- 4- Avviare le manovre di trasferimento in sicurezza

Il corretto utilizzo dell'ausilio mette in sicurezza la persona dal rischio di caduta.

*Si precisa che le immagini presenti nel documento sono tratte dal sito web WikiHow che consente l'utilizzo del proprio materiale per fini non commerciali.*

## Istruzioni per l'utilizzo sicuro del sollevatore

Rev. 00  
Emissione  
01/02/2020


Pagina  
3/9

**Cosa è necessario sapere per evitare il rischio di caduta della persona assistita durante le manovre di trasferimento utilizzando il sollevatore**

### 1. Scegliere l'imbragatura

ovvero individuare quella idonea alla persona assistita

N.B.

	KEYWORDS	
	CONOSCERE	<p><b>Conoscere le tipologie</b> di imbragatura in dotazione e individuare quella idonea alla persona assistita. Attenzione in particolare al paziente amputato!</p>
	UTILIZZARE	<p><b>Utilizzare la giusta taglia</b> in relazione alle caratteristiche del paziente, ricercando il riferimento (in genere espresso come XS-S-M-L-XL-XXL) riportato sull'imbragatura stessa, e/o sul sollevatore.</p>
	EVITARE	<p><b>Evitare comportamenti a rischio</b> quali: imbragatura non adatta gambali mal posizionati scorretta inserzione del gancio al supporto.</p>

**Istruzioni per l'utilizzo sicuro del sollevatore**

Rev. 00  
Emissione  
01/02/2020

Pagina  
4/9

**2. Identificare la tipologia di aggancio**

Sono disponibili più tipologie di aggancio:  
occorre conoscere gli elementi che costituiscono il sistema dell'imbragatura in dotazione

<b>Tipologia 1: Aggancio ad asola</b>			
Gancio "Asola"	Supporto	Inserimento corretto	<b>Avvertenze</b>
			Sono possibili diverse regolazione di lunghezza, a seconda dell'asola utilizzata.
<b>Tipologia 2: Aggancio ad incastro in plastica</b>			
Gancio "in plastica"	Supporto	Inserimento corretto	<b>Avvertenze</b>
			Verificare prima di ogni manovra l'avvenuto inserimento. (Vedi paragrafo 3. Evitare comportamenti a rischio)

**Istruzioni per l'utilizzo sicuro del sollevatore**

Rev. 00  
Emissione  
01/02/2020

Pagina  
5/9

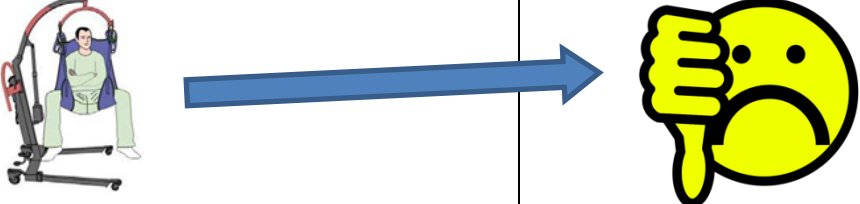
**3. Evitare comportamenti a rischio**

L'utilizzo del sollevatore, con modalità non conforme agli standard di sicurezza, può favorire il rischio di caduta della persona assistita. Ecco alcuni degli errori più frequenti:

**Tipologia di errore 1: non corretta valutazione della taglia dell'imbragatura**

Esempio 1		Esempio 2	<b>Avvertenze</b>
			<p>Se la taglia dell'imbragatura non è idonea alla fisicità della persona, si rischia uno scorretto posizionamento che, soprattutto nel caso di imbragatura troppo grande, può favorire il scivolare fuori dal telo, con conseguente caduta.</p>

**Tipologia di errore 2: non corretto posizionamento gambali**

Esempio	<b>Avvertenze</b>
	<p>Il mancato incrocio dei gambali potrebbe provocare scivolamento della persona fuori dall'imbragatura con conseguente caduta.</p>

Istruzioni per l'utilizzo sicuro del sollevatore

Rev. 00  
Emissione  
01/02/2020

Pagina  
6/9

Tipologia di errore 3 : non corretto inserimento gancio.

Esempio 1



Esempio 2



Avvertenze

Lo scorretto inserimento del gancio dell'imbragatura al suo supporto, potrebbe provocare lo sgancio dell'imbragatura stessa con conseguente caduta della persona.

Tipologia di errore 4 : non corretto posizionamento sollevatore.

Esempio 1



**n.b.** controllare la superficie di appoggio: in questa immagine la base è inclinata.



Esempio 2



**n.b.** controllare l'inserimento del freno: in questa immagine il sollevatore non è frenato.

Avvertenze

Occorre la massima attenzione nel verificare che nella fase di imbragatura/sollevamento della persona:

- la superficie di appoggio del sollevatore sia sempre in piano.
- sia avvenuto il corretto inserimento del freno.





**Istruzioni per l'utilizzo sicuro del sollevatore**

Rev. 00  
Emissione  
01/02/2020

Pagina  
7/9

**4. Avviare le manovre di trasferimento in sicurezza**







applicare tutte le azioni atte a garantire standard di sicurezza (sia per chi riceve, sia per chi effettua il trasferimento).

<b>MANOVRA DI TRASFERIMENTO</b>	1° STEP	Sistemare l'imbragatura con le modalità idonee, a seconda della posizione di partenza.	
	2° STEP	<b>Spostamento da letto:</b> avvicinare a sufficienza il sollevatore alla persona, alloggiando la base dello stesso nello spazio sottostante il letto.	
		<b>Spostamento da sedia o carrozzina:</b> mantenere il paziente in posizione centrata tra le gambe della base del sollevatore, sempre in posizione rivolta verso chi lo assiste.	
3° STEP	Allargare, laddove necessario, le gambe della base del sollevatore, fino alla massima ampiezza possibile, tirando leggermente la leva di apertura verso l'operatore e bloccandola nella posizione di apertura.		

**Istruzioni per l'utilizzo sicuro del sollevatore**

Rev. 00  
Emissione  
01/02/2020

Pagina  
8/9




<b>MANOVRA DI TRASFERIMENTO</b>	<b>4° STEP</b>	Agganciare con cura l'imbracatura al bilanciante	<b>Spostamento da letto</b>	<b>Spostamento da sedia o carrozzina</b>
				
	<b>Prima di iniziare il sollevamento:</b> assicurarsi che il paziente sia correttamente imbragato, (gambali e taglia conforme) <b>n.b.:</b> alcune imbragature prevedono di incrociare i gambali mentre per altre non è necessario: verificare le indicazioni.	<b>gambali correttamente incrociati</b>	<b>taglia corretta ottima sistemazione bacino/spalle</b>	
				
	<b>5° STEP</b>	- Sollevare la persona all'altezza necessaria. - Controllare sempre la corretta posizione della persona per tutto l'arco di movimento. <b>n.b.:</b> durante il trasferimento la persona deve rimanere frontale rispetto all'operatore che effettua la movimentazione.		



**Istruzioni per l'utilizzo sicuro del sollevatore**

Rev. 00  
Emissione  
01/02/2020

Pagina  
9/9

<b>MANOVRA DI TRASFERIMENTO</b>	<b>6° STEP</b>	<p>Sbloccare le ruote posteriori del sollevatore e trasferire la persona.</p> <p><b>n.b.</b> : prima di iniziare la discesa della persona imbragata verso la destinazione, <u>bloccare nuovamente</u> le ruote posteriori</p>	
	<b>7° STEP</b>	<p>Durante la discesa assistere sempre la persona, tenendo sotto controllo la corretta posizione di seduta!</p>	 
	<b>8° STEP</b>	<p>Al termine del trasferimento <b>rimuovere sempre l'imbragatura</b></p> <p><b>n.b.:</b> la rimozione è importante al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ evitare lo scivolamento sul piano di appoggio. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ non causare compressioni anomale (ad esempio in corrispondenza delle cuciture).</li> </ul> </li> <li>▪ non ostacolare la traspirazione della cute.</li> </ul>	