

LA STERILIZZAZIONE

PROCEDURE PER I REPARTI E I SERVIZI OSPEDALIERI

4. CONTENUTO

LA DECONTAMINAZIONE E LA DETERSIONE DELLO STRUMENTARIO CHIRURGICO

RISORSE MATERIALI PER LA DECONTAMINAZIONE

- Soluzione disinfettante a base di polifenoli.
- Vaschetta per immersione del dispositivo.
- Guanti in gomma monouso, visor e camice di protezione.
- Detergente enzimatico

PROCEDURA DI DECONTAMINAZIONE

1. Indossare i dispositivi di protezione individuale.
2. Immergere, subito dopo l'utilizzo, il dispositivo nella soluzione disinfettante (usare il materiale disinfettante disponibile in Azienda alla percentuale indicata dalla casa produttrice).
3. Gli strumenti devono essere immersi aperti e/o smontati in ogni loro parte.
4. Eliminare i guanti utilizzati per l'immersione del dispositivo.
5. Lasciare agire per almeno 15 minuti.
6. Procedere alla fase di pulizia.

Tutti i dispositivi riutilizzabili venuti a contatto con materiale biologico devono essere sempre decontaminati (D. M. 28.9.'90)

RISORSE MATERIALI PER LA DETERSIONE

- Detergente enzimatico.
- Acqua.
- Scovolini.
- Guanti di gomma.
- Camici/grembiuli impermeabili.
- Visiera a protezione totale del viso.
- Telo pulito per l'asciugatura.
- Pistola ad aria compressa, se presente.

PROCEDURA DI DETERSIONE

1. Indossare il camice, la visiera ed i guanti in gomma.
2. Prelevare i dispositivi dalla soluzione decontaminante.
3. Immergere i dispositivi in una soluzione con detergente enzimatico per almeno 15 minuti.
4. Detergere i dispositivi in ogni loro parte, utilizzando, scovolini se necessario.
5. Risciacquare il dispositivo con acqua corrente.
6. Asciugarlo accuratamente con il telo pulito. Se si tratta uno strumento scanalare provvedere all'asciugatura utilizzando la pistola ad aria compressa ove possibile.
7. Gli spazzolini e gli scovolini devono poi essere sciacquati e trattati con una soluzione a base di ipoclorito di sodio.

INVIO DEL MATERIALE IN CENTRALE DI STERILIZZAZIONE

Inviare il materiale decontaminato e deterso alla Centrale di Sterilizzazione posizionato negli appositi contenitori accompagnato dalla specifica modulistica correttamente compilata